

フォラケア・ブルーランセット

再使用禁止


【警告】

1. 穿刺前に穿刺部位の消毒を行うこと。また、採血後は穿刺部位の止血と保護を行うこと。傷口が治りにくいときはこまめに消毒すること。[感染の危険性がある。]
2. 使用後は他の人に触れないように廃棄すること。[感染の危険性がある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用しないこと。[感染の危険性がある。]
2. 保護キャップが緩んでいたり外れている場合や、破損などがある場合には使用しないこと。[無菌性の保証ができない場合がある。]

【形状・構造及び原理等】

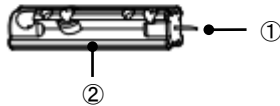

No.	名称
①	針
②	ハウジング
③	保護キャップ

寸法：32mm（長さ）× φ6.4mm

針の太さ：30G


※本品は潤滑剤としてシリコーン油を使用している

【使用目的又は効果】


血液検査のため、少量の血液を指先、耳朵等の血管から採取する。

【使用方法等】

- 1) 採血用穿刺器具のランセットホルダーにハウジングを固定する。
- 2) 保護キャップをねじり、取り外してから採血用穿刺器具のキャップを取り付ける。

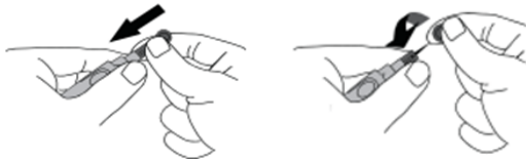

- 3) 使用後は事故防止のため針先を保護キャップに刺してから取り外して廃棄する。

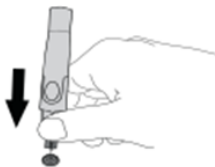

※採血用穿刺器具はフォラケア・モノスティック（届出番号13B1X10090000014）を使用すること。初めて使用する前に、本品を穿刺器具に挿入して動作させても外れず固定されたままであることを確認すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 組み合わせて使用する採血用穿刺器具の添付文書もよく読んでから使用すること。
 - 2) 穿刺部位を清潔にしてから採血を行うこと。
 - 3) 指先から採血する場合は、穿刺前に必ず流水でよく手を洗うこと。
 - 4) 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがある。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告がある。]
 - 5) 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は血糖値が偽低値を示すことがある。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
 - 6) 耳朵等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合は、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。[組織を貫通した針先で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺を検討すること。]
2. その他の注意
 - 1) 保護キャップを外したらすぐに使用すること。
 - 2) 保護キャップを外している時は怪我に注意すること。
 - 3) 使用後は事故や感染の防止のため針先を保護キャップに刺した状態で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 使用期限は外装の使用期限欄を参照のこと。[自己認証による]

【包装】

30 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社フォラケア・ジャパン
東京都港区新橋 5-10-8 FORA ビル
(TEL) 03-6452-8642

外国製造業者（国名）

Taidoc technology corporation（台湾）