


フォラケア・グラフィック設定手順

1 はじめに

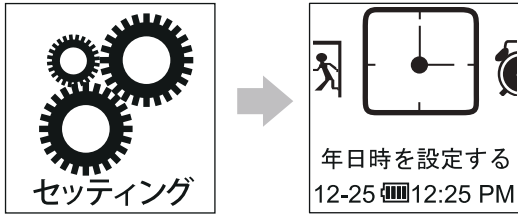

① 充電完了後、任意ボタンを押して電源を入れます。 → M

② ▲ または ▼ → 「セッティング」 → M

③ ▲ または ▼ → 「年日時の設定」 → M

2 年の設定



<押して年を合わせます>

▲ → 18 → ▲ → 19...
▼ → 16 → ▼ → 15...


3 日付表示の設定



<押して表示を設定します>

▲ → 日-月 → ▲ → 月-日...
▼ → 日-月 → ▼ → 月-日...

4 月日の設定

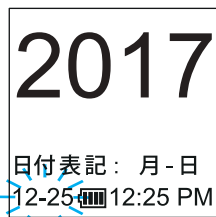

<押して月を合わせます>

▲ → 1 → ▲ → 2 ...
▼ → 11 → ▼ → 10...

<押して日を合わせます>

▲ → 26 → ▲ → 27...
▼ → 24 → ▼ → 23...

5 時間表示の設定



24時間表示

ポチッと決定!



12時間表示

ポチッと決定!

6 時分の設定




<押して時を合わせます>

▲ → 13 → ▲ → 14...
▼ → 11 → ▼ → 10...

<押して分を合わせます>

▲ → 26 → ▲ → 27...
▼ → 24 → ▼ → 23...

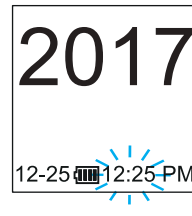

<押して時を合わせます>

▲ → 1 → ▲ → 2 ...
▼ → 11 → ▼ → 10...

<押して分を合わせます>

▲ → 26 → ▲ → 27...
▼ → 24 → ▼ → 23...

▲ または ▼




ポチッと終了!



設定完了!




時刻アラーム


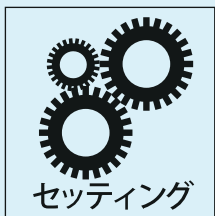


① ▲ または ▼ → 「セッティング」 → M

② ▲ または ▼ → 「アラームの設定」 → M

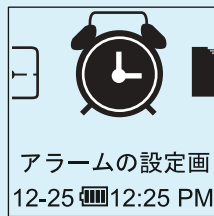

▲ または ▼ → M

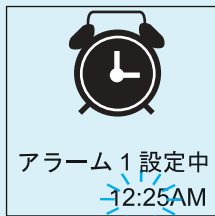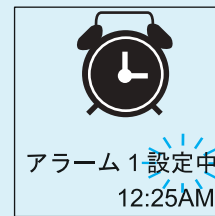

<押して時を合わせます>

▲ → 1 → ▲ → 2 ...
▼ → 11 → ▼ → 10...

<押して分を合わせます>

▲ → 26 → ▲ → 27...
▼ → 24 → ▼ → 23...



ポチッと終了!

