



# フォラケア・モノスティック 操作手順書

## 【各部名称】

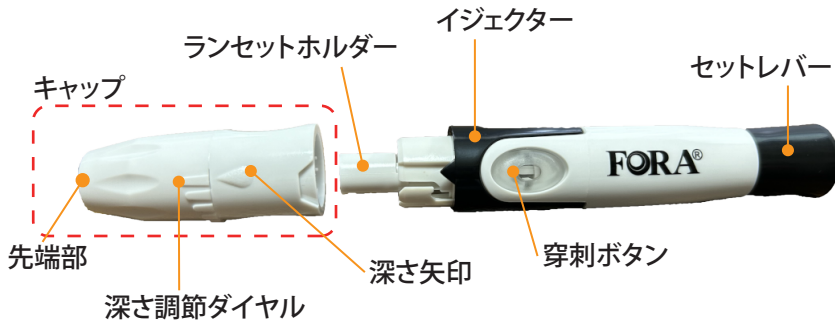

専用消耗品(ランセット)  
フォラケア・ブルーランセット

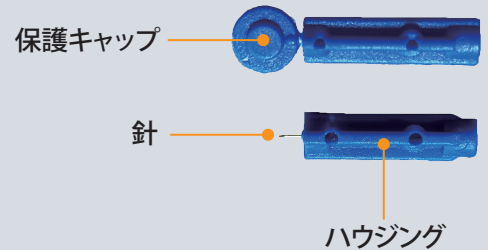

ご使用前に添付文書をご確認ください



フォラケア・モノスティック




フォラケア・ブルーランセット

## 穿刺方法


動画版




- 1** キャップを回して取り外します。

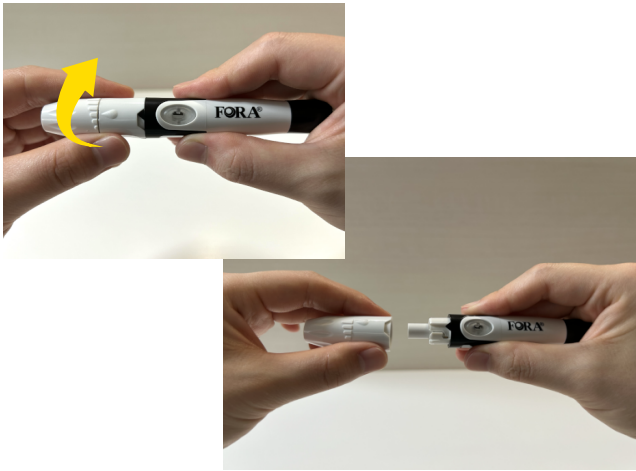


- 2** ランセットホルダーをしっかりと押さえながらランセットを奥まで挿し込みます。

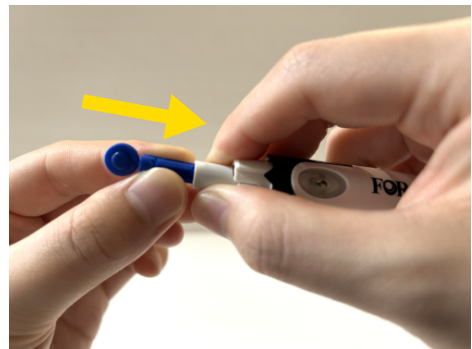

- 3** ランセットの保護キャップをねじって取り外します。  
取り外した保護キャップは廃棄時に使用するため捨てないでください。

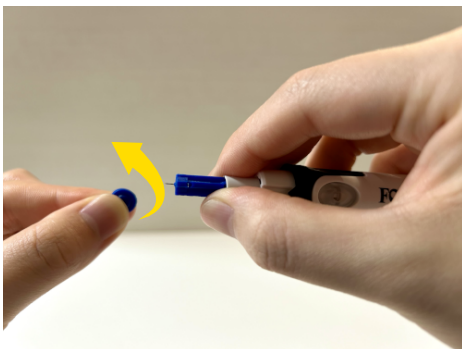

- 4** 針先に注意しながらキャップをかぶせ回して固定します。

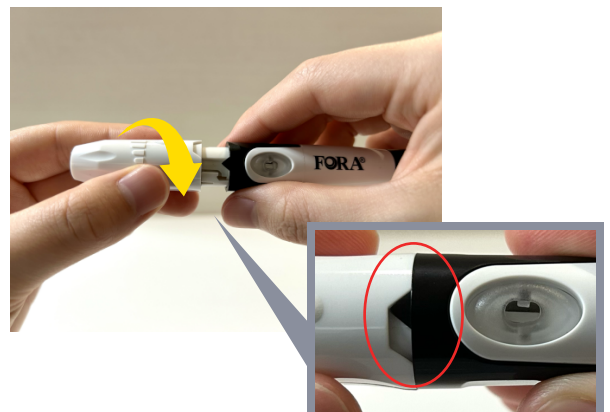


キャップが固定された状態

5

深さ調節ダイヤルを回して穿刺深さを調節します。



穿刺の深さ(6段階)

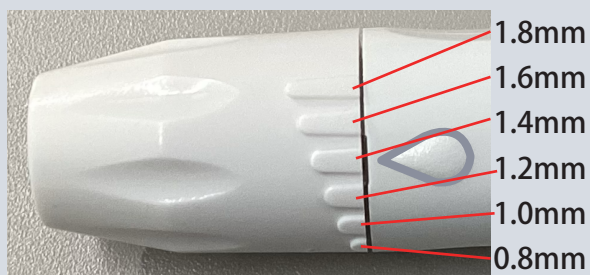

6

穿刺ボタンに触らないよう注意しながら  
穿刺ボタンがオレンジ色に変わるまで  
セットレバーを引きます。



7

先端部を穿刺部位に押し当てて  
穿刺ボタンを押します。  
穿刺前に穿刺部位を消毒し、よく乾かしてください。




## 廃棄方法

動画版




1

キャップを回して取り外します。

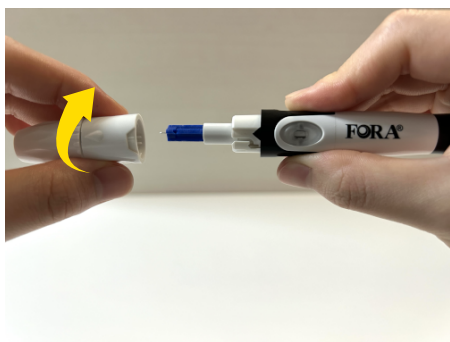

2

ランセットの針先を保護キャップに刺します。

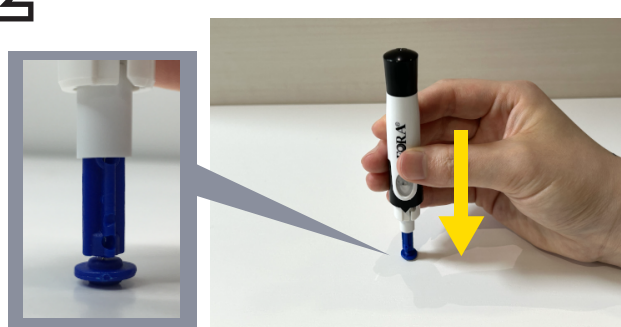

3

イジェクターをスライドさせて  
ランセットを廃棄します。



4

キャップを回して取り付けます。



本体が汚れた場合は、水またはアルコールで湿らせた  
綿棒か布で軽く拭いてください。

製造販売業者  
株式会社フォラケア・ジャパン

〒105-0004  
東京都港区新橋5-10-8 FORAビル3階  
TEL: 03-6452-8642  
FAX: 03-6452-8641  
WEB: <https://www.foracare.co.jp>

お問い合わせ



501004-01-2405