

【フォラケア・PO200 よくあるご質問】

Q. 本体に指を入れてもなかなか測定がはじまりません。

A. 原因として下記のことが考えられます。

- ・指先が奥まで入っていない：発光部と受光部に指先が触れるようにしてください
 - ・指先が冷えている：温めたり、マッサージをして血行をよくしてから測定してください
 - ・体動がある：測定中は指先、体を動かさないでください
 - ・強い光が当たる場所で測定している：太陽光やスポットライトなどの強い光が当たらない場所で測定してください
 - ・マニキュアなどを塗っている：マニキュアなどを落として測定してください
- 上記で解決しない場合は弊社までお問い合わせください。

Q. 測定中に数値が変動します。

A. 15秒間の平均値を1秒ごとに更新しながら測定しているため、1秒ごとに数値は変動します。また人体の活動にともない SpO₂(酸素飽和度)も変動します。そのため測定開始から15秒以上経過した数値を読みとってください。

Q. 他メーカーのパルスオキシメータで測定した値と異なります。

A. メーカーや機種によって読みとった信号の処理方法が違うため測定差が生じます。通常使用しているパルスオキシメータの値を基準として、医師の指示に従ってください。

Q. 画面の横に表示されている縦の棒線はなんですか？

A. 脈拍インジケータです。

脈拍に同期して、収縮期にはインジケータが増加し、拡張期には減少します。インジケータが多く表示される指で測定してください。

Q. 電源が入りません。

A. 下記のことをご確認ください。

- ・電池が切れている：新しい電池に交換してください
- ・電池の向きを間違えている：電池を正しく入れ直してください
- ・電源ボタンを押していない：電源ボタンを押してから指先を入れてください
- ・機械の故障：使用を中止し、弊社までお問い合わせください

Q. 電源を切るにはどうしたらいいですか？

A. 本体から指先を抜くと約15秒後に自動的に電源がオフになります。電源ボタンを長押ししても電源をオフにできます。

Q. 画面に[bAt Lo]が表示されます。

A. 電池残量が少なくなっているため、新しい電池に交換してください。

Q. 対象年齢を教えてください。

A. 対象年齢はありません。フィンガーホルダーに指先を奥まで挿入して値が表示されれば測定可能です。日本呼吸器学会は、指先(爪基部)の厚さが 6~18mm ならば安定的に測定ができると説明しています。

Q. 測定する指の指定はありますか？

A. 指先がフィンガーホルダーの奥まで挿入できれば、どの指でも測定は可能です。

Q. アラート機能はありますか？

A. SpO2 が 85%未満の場合、バックライトが赤く点滅します。

Q. 正常値を教えてください。

A. 日本呼吸器学会によると[健常時は SpO2 が 96~99%が標準値]とされております。測定値の医学的判断が必要な場合は、かかりつけ医にご相談ください。

Q. ペースメーカーを使用しています。本品を同時に使用しても大丈夫ですか？

A. ご使用前にかかりつけ医にご相談ください。

Q. Bluetooth 機能は何に使用するのですか？

A. 専用アプリ[iFORA 02]との通信に使用します。本品単体でもご使用いただけます。

Q. [iFORA 02]とは何ですか？

A. 測定結果を携帯端末などで見るアプリです。

iOS、Android で測定結果の表示、測定記録の管理ツールとしてご使用いただけます。

Q. 製造国を教えてください。

A. 台湾です。

Q. 医療機器ですか？

A. 医療機器の認証を取得しています。(認証番号：302AABZX00002000)

Q. 保証期間を教えてください。

A. ご購入後 1 年間です。

Q. 付属品のみの販売はありますか？

A. 電池ふた(黒・白)、ネックストラップがあります。